

## STANDARD Q

REF Q-NCOV-01G

# COVID-19 Ag

## STANDARD™ Q COVID-19 Ag Test

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ  
ДО НАЧАЛА ТЕСТИРОВАНИЯ

SD BIOSENSOR

### КОМПЛЕКТАЦИЯ




Тест-кассета  
(в индивидуальной  
упаковке из фольги  
в комплекте  
с осушителем)




Буферная  
пробирка  
для экстракции



Насадка  
с капельником

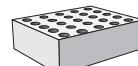

Стерильный  
тампон  
для забора  
проб

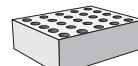


Подставка  
из картона




Инструкция  
по использованию

### ПОДГОТОВКА

- 1 Внимательно прочтите инструкцию по использованию теста STANDARD Q COVID-19 Ag

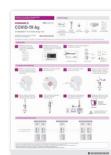

- 2 Проверьте срок годности на обратной стороне упаковки. Не используйте тест, если срок годности истек.

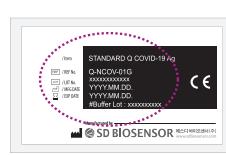

- 3 Проверьте тест-кассету и осушитель в упаковке из фольги




<Упаковка из фольги>




Желтый  
Зеленый  
Желтый:  
Действительный  
Зеленый:  
Недействительный  
<Тест-кассета>  
<Осушитель>

### ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ


- 1 Введите стерильный тампон для проб в ноздрю пациента, достигая задней поверхности носоглотки

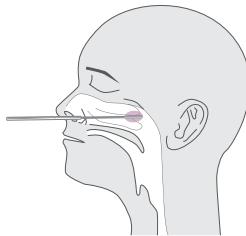


- 2 Проведите по задней поверхности носоглотки

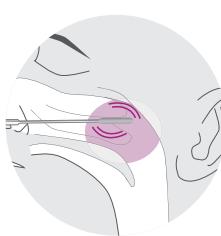

- 3 Выньте стерильный тампон из носовой полости.

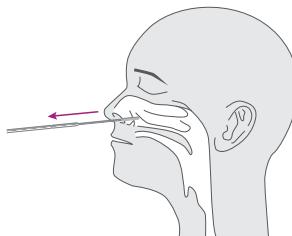

- 4 Вставьте тампон в буферную пробирку для экстракции. Сжимая пробирку, поверните тампон более пяти раз.

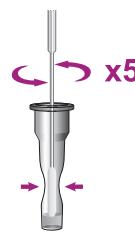


- 5 Выньте тампон, продолжая сжимать пробирку, для отделения жидкости из тампона.



- 6 Плотно закройте буферную пробирку насадкой с капельником.



- 7 Нанесите три капли выделенного образца в кювету для образцов тест-кассеты.

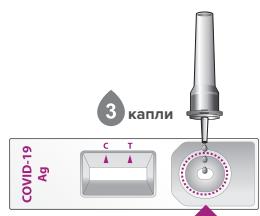

- 8 Проверьте результат через 15-30 минут.




Проверить  
результат  
через 15-30 мин.  
Не проверять  
после 30 мин.

ВНИМАНИЕ!  
Не проверяйте результат после истечения 30 минут. Результат может быть недостоверным.


### ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

#### ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ

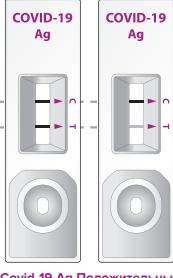


Контрольная линия «C»  
Тестовая линия «T»

#### ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ

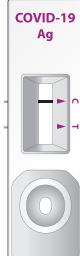

COVID-19 Ag  
C T

#### НЕДОСТОВЕРНЫЙ

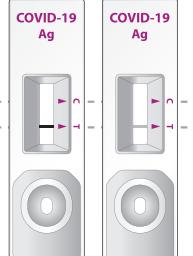

1. Цветная полоса появится в верхней части окна результатов, подтверждая правильную работу тест-кассеты. Эта полоса является контрольной линией (C).  
2. Цветная полоса появится в нижней части окна результатов. Эта полоса является тестовой линией антигена SARS-CoV-2 (T).  
3. Даже если контрольная линия очень слабая, или тестовая линия не однородна, тест следует считать выполненным с положительным результатом.

\* Появление любой линии, не зависимо от ее яркости, подтверждает положительный результат теста.

\* Положительный результат следует рассматривать в сочетании с историей болезни и другими доступными данными.

