




STANDARD™ Q

COVID-19 IgM/IgG Combo

Набор для проведения экспресс-теста для качественного выявления и дифференциации антител IgM / IgG к новому коронавирусу SARS-CoV-2 в образцах капиллярной, венозной крови, сыворотки или плазмы крови человека

REF Q-NCOV-01C

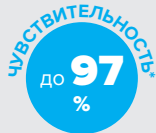
РЕЗУЛЬТАТ ЧЕРЕЗ
10-15 МИН.ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
до 97 %СПЕЦИФИЧНОСТЬ
98 %

* результаты получены в ходе проведения клинико-лабораторных испытаний на территории РФ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Простота применения.
- Ультразбыстрое получение результатов анализа с последующим принятием решения об изоляции.
- Тесты определяют образование антител, что является основанием для дальнейшего эпидемиологического обследования пациента.

Динамика периодов развития коронавирусной инфекции COVID-19

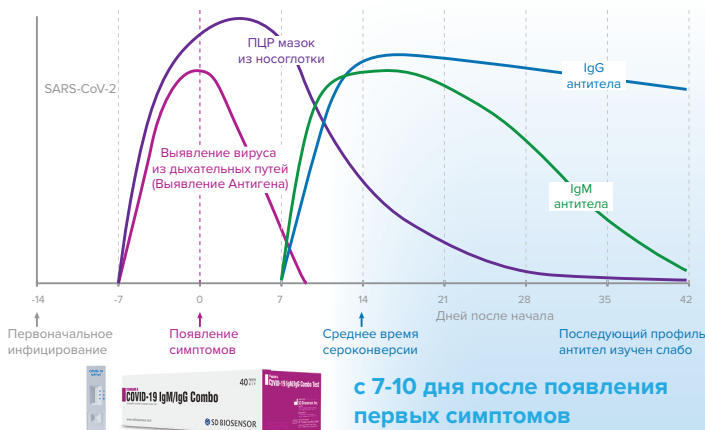

Тесты на наличие антител **IgM** методом ИХА могут применяться уже **с 7-10 дня после появления первых симптомов**, когда в организме начинают вырабатываться антитела класса **IgM**. Тесты на наличие антител **IgG** методом ИХА могут применяться уже **с 10-14 дня после появления первых симптомов**, когда в организме начинают вырабатываться антитела класса **IgG**.

WhiteProduct

Авторизованный представитель по России и СНГ
WHITE PRODUCT LLC., CO
ООО «Уайт Продакт»

117105, г. Москва, 1-й Нагатинский пр-д, д. 2, стр. 7,
этаж 3, помещение VIII, комната 3.2
sales@white-product.com | www.white-product.com

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- **Метод исследования:** беспробирный иммунохроматографический анализ (ИХА).
- **Цель анализа:** выявление и дифференциация антител IgM/IgG.
- **Биоматериал:** капиллярная кровь из пальца, плазма, сыворотка, венозная кровь.
- **Время проведения одного теста:** 10-15 мин.
- **Результаты теста:** позитивный/негативный/недействительный.
- **Оборудование для проведения тестов:** не требуется.
- **Упаковка:** 40 тестов.
- **Производитель:** SD BIOSENSOR, Южная Корея.
- **Сертификация:** Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) **№ РЗН 2020/12954 от 15.12.2020**
2020.03.05 декларация соответствия CE.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

- **Тестовое устройство (индивидуально в фольге с осушителем)** — набор 40 (IgM/IgG) тест-систем
- **Флакон буферного раствора** — 1 флакон для 40 тест-систем



- **Капиллярная трубка (10 мкл)** — 40 трубочек в наборе

- **Инструкция по применению** — 1 инструкция